

Huolto-ohjelma – sarja 1400

Ensimmäinen huolto 1000 km/12 kuukauden jälkeen, sen jälkeen 2000 km/12 kuukauden välein

- -Vaihda tasauspyörästön öljy. 1,8 - 2 dl 80W-90
- Tarkista rengaspaine. 2-2,5 bar/30-35psi
- Tarkista jarrut.
 - Skootterin pitää rullata tasaisesti ilman kitkaa. Varmista, että käsijarru toimii.
 - Säädä tarvittaessa.
- Voitele ja testaa lukot.
- Tarkista akut.
 - Etsi merkkejä sulamisesta, viallisista johdoista tai hapettumisesta.
- Testaa laturi.
 - Aloita lataus ja mittaa akusta tuleva jännite ~72V.
 - Jos latausjännite poikkeaa yli 5 voltia normaalista, katso laturin etikettiä ja tilaa meiltä uusi laturi, jos se on selvästi viallinen.
 - Akut ja pääjohdot ovat etuistuimen alla.
- Luo yleissilmäys ja koeaja skootteri.
- Leimaa, kirjoita kilometrimäärä ja päivää käyttö-/huoltomanuaali.

Arvioitu työaika 1 tunti lukuun ottamatta todellisia ongelmia.